

DEZORHARM

КАТАЛОГ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ


DEZOPHARM





СОДЕРЖАНИЕ:

Универсальные дезинфицирующие средства.....	5
Средства для дезинфекции и предстерилизации.....	13
Кожные антисептики.....	20
Экспресс дезинфекция.....	26
Дезинфицирующие средства для эндоскопов.....	30
Дезинфицирующие салфетки.....	36
Хлорсодержащие средства.....	40
Гигиена рук.....	44
Очищающие и моющие средства.....	48

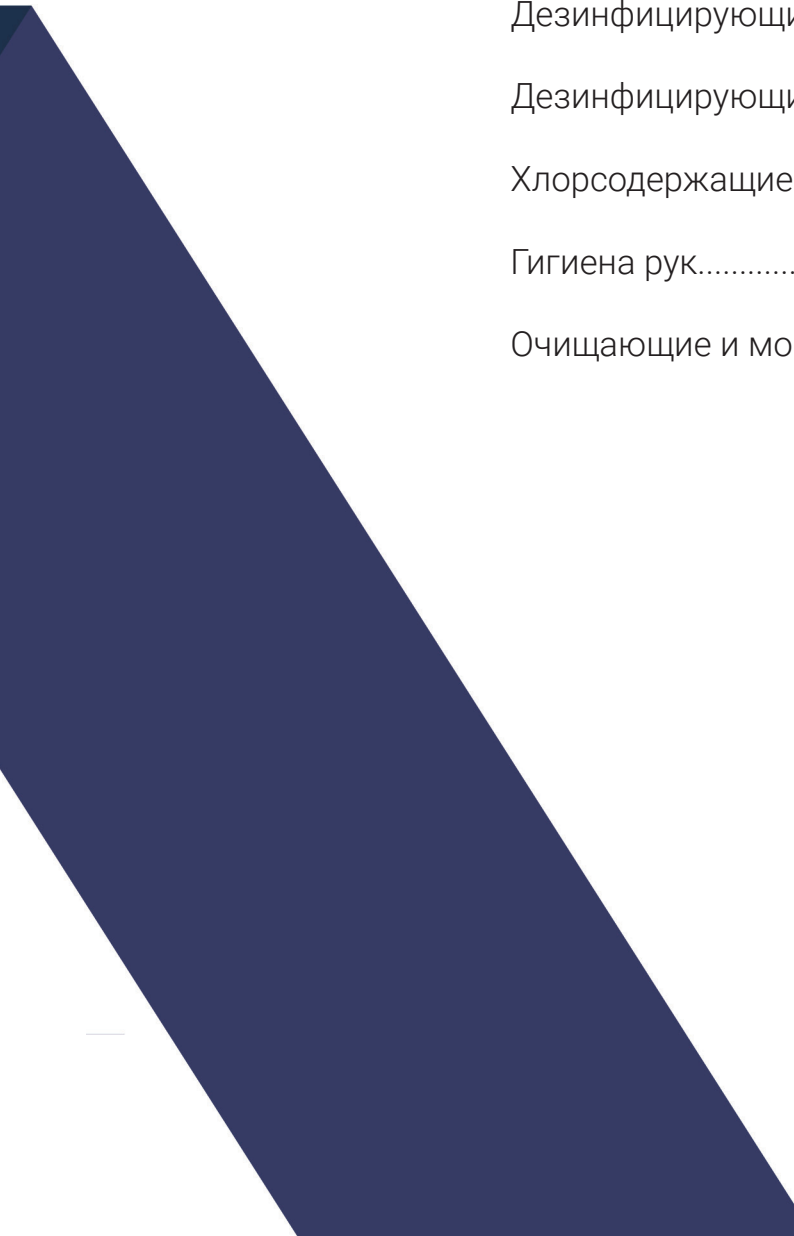

The background features a series of thin, light blue diagonal lines in the upper left corner. Below these, there are large, overlapping geometric shapes: a teal triangle on the left, a dark blue triangle in the center, and a dark purple triangle on the right.

DEZOPHARM

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА**



ЭКОБРИЗ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, амины

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования, включая отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких, куветов;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
- **дезинфекция медицинских отходов;**
- **борьба с плесневыми грибами;**
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):**
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, плевательниц;
- **проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием уборочных технологий.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1% / 0,25% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Вирусы — 1,0% / 2,0% / 3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 2,0% / 4,0% / 6,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

1,0% / 2,0% / 3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
2,0% / 4,0% / 6,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.



МИРОДЕЗ УНИВЕР

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, глиоксаль, синергисты биоцидов

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования;
 - лабораторной и столовой посуды; белья, предметов ухода за больными; уборочного инвентаря;
 - мусороборочного оборудования и мусоросборников;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):**
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием уборочных технологий;**
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,01% / 0,05% / 0,2% / 0,5% — 120 мин. / 60 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,1% / 0,25% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / — 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

0,2% / 0,4% — 60 мин. / 30 мин.
0,5% / 1,0% / 2,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.



МИРОДЕЗ БАЗИК

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов; антикоррозионные компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекции + уборка:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороборочного оборудования и мусоросборников;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мекроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории;
 - станции и пункты переливания и забора крови;
- **борьба с плесневыми грибами;**
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий ме-дицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,2% / 0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,8% / — 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин.
1,5% / 2,0% — 30 мин. / 15 мин.



МИРОДЕЗ ПУР

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *M.terrae*)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция + мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования;
 - лабораторной и столовой посуды (режим совмещения обезжиривания и дезинфекции), белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, игрушек, резиновых и полипропиленовых ковров, обуви из резины, пластика и других полимерных материалов;
 - мусороборочного оборудования и мусоросборников;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
- **проведение профилактической дезинфекции** на предприятиях фармацевтической и биотехно-логической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов С и D;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,2% / 0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,8% / — 60 мин.



РЕМЕДИН ЛАЙТ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей чумы, холеры, туляремии)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 30 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекции + уборка:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования, куветы;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
 - пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
- датчики УЗИ;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/1,0%—60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0%— 60 мин. / 30 мин. / 15 мин./5 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

0,8%/1,5%/3,0%—60 мин./30 мин./15 мин.



РЕМЕДИН УНИВЕРСАЛ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, амин

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 30 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекции + уборка:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования; куветы;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
 - пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
- датчики УЗИ;
- **дезинфекция + предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/1,0%—60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0%— 60 мин. / 30 мин. / 15 мин./5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5,0%/ 6,0%/8,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.
2,0%/3,0%/5,0%/7,0% — 120 мин. / 60 мин./30 мин./15 мин.



РЕМЕДИН

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, амин; производные гуанидина

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae, tuberculosis*, чумы, холеры, туляремии, легионеллеза)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция + уборка:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования; кувезы;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
 - пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
 - датчики УЗИ;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 5,0% / 6,0% / 8,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.
2,0%/3,0%/5,0%/7,0% — 120 мин. / 60 мин./30 мин./15 мин.



РЕМЕДИН КЛАССИК

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, производные гуанидина

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей чумы, холеры, туляремии)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 30 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования; кувезы;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
 - пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
 - датчики УЗИ;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/1,0%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,8% / 1,5% / 2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин./5 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.



МИРАФЛОРЕС

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов; антикоррозионные компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, вкл. рода Кандида, дерматофиты

Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 30 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования, вкл. куветы, барокамеры, бактерицидные камеры;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусоруборочного оборудования и мусоросборников;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
 - **воздуха способом распыления** на различных объектах, профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- **предстерилизационная очистка, не совмещенной с дезинфекцией**, медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, а также стоматологические материалы) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Вирусы — 0,5% / 1,0% / 1,5% / 3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

0,5% / 1,0% / 1,5% / 3,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.



АМИГО

Упаковка:

10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, амины, ПГМГ, ПГМБ

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза (тестировано на M. terrae), легионеллы, особо опасных инфекций — чумы, холеры, туляремии;
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей, полиомиелита, рота — и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов;
- патогенные грибы, включая плесневые.

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Возможность многократного использования (в течение 30 суток)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

• дезинфекция + уборка

- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, приборов, оборудования; включая отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких; куветов; санитарно-технического оборудования, в т.ч. акриловых ванн; посуды (молочной, столовой, лабораторной, сосок, молокоотсосов), белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря; систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

• **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка): хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, плевательниц;

• **дезинфекция пищевых яиц**, воздуха, медицинских отходов класса Б и В, включая биологические выделения;

• **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,01% / 0,02% / 0,05% / 0,1% / 0,2% — 120 мин. / 90 мин. / 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Вирусный — 0,15% / 0,2% / 0,5% / 1,2% / 3,0% — 60 мин. / 45 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Туберкулезный — 0,5% / 1,0% / 1,5% / 2,0% — 120 мин. / 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

Дезинфекция ИМН + ПСО

Вирусный — 0,15% / 0,25% / 0,5% / 1,2% — 60 мин. / 45 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Туберкулезный — 0,5% / 1,0% / 1,2% / 1,5% / 2,0% / 3,0% — 120 мин. / 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.



ВЕРАМИН

Упаковка:

10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: амин, неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза (тестировано на *M. terrae*), легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей, полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы, включая плесневые.

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Возможность многократного использования (в течение 30 суток)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекции + уборка** поверхностей в помещениях, жесткой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, приборов, оборудования; включая отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких; кузевозов; санитарно-технического оборудования, в т.ч. акриловых ванн; посуды (молочной, столовой, лабораторной, сосок, молокоотсосов), белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря; систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка): хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, плевательниц;
- **дезинфекция** пищевых яиц, воздуха, медицинских отходов класса Б и В, включая биологические выделения;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/1,0% — /60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.

Вирусный — 0,5%/1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.

Туберкулезный — 0,5%/1,0%/2,0%/4,0% — 120 мин./60 мин./30 мин./15 мин.

Дезинфекция ИМН + ПСО

Вирусный — 1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин./30 мин./15 мин.

Туберкулезный — 3,0%/4,0%/5,0% — 60 мин./30 мин./15 мин.



БАКТЕРИДЕЗ

Объемы:

0.2 л; 1 л; 5 л.

Состав:

Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин, активатор биоцидности, НПРАВЫ, ингибитор коррозии. pH 1% водного раствора средства 8,4.

Антимикробная активность в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая *Mycobacterium terrae*), возбудителей ВБИ;
- в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе рино-, коро-, рото-, адено-вирусов, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ-инфекций, вирусов гриппа и парагриппа человека, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции и т.д.;
- фунгицидная активность в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, легионеллеза, анаэробных инфекций, возбудителей ООИ (чума, холера, туляремия).

Уникальные свойства:

- не требует ротации,
- отличные моющие, обезжиривающие и дезодорирующие свойства,
- удаляет с поверхностей биологические плёнки,
- не вызывает коррозии инструментальных сталей и сплавов,
- средство полностью биоразлагаемо и экологически безопасно.

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и мойка:** различных поверхностей, ИМН, эндоскопов, инструментов парикмахерских, обуви, резиновых и полипропиленовых ковров;
- **предстерилизационная очистка ИМН;**
- **обеззараживание медицинских и пищевых отходов;**
- **обеззараживание крови;**
- **борьба с плесенью;**
- **генеральные уборки.**



АБАКТЕРИЛ КОНЦЕНТРАТ

Объёмы:

0.2 л; 0.5 л; 1 л; 3 л; 5 л; 10 л; 20 л.

Состав:

Смесь ЧАС, ПГМГ, триамин - суммарно 9%, вспомогательные и дезодорирующие компоненты, отдушка, вода, ингибиторы коррозии. Подходит практически для всех видов дезинфекции и обработки.

Антимикробная активность:

- антимикробная активность в отношении всех видов бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, и грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробных инфекций;
- обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней.

Уникальные свойства:

- средство обладает хорошими моющими (при малом пенообразовании), обезжиривающими и дезодорирующими свойствами;
- не портит обрабатываемые объекты, не оказывает отбеливающего действия на цветные ткани, не повреждает изделия из различных металлов, включая, углеродистые стали и сплавы, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов;
- удаляет белковые, жировые и другие виды загрязнений с поверхностей из различных материалов (стекло, керамика, металлы, ковровые покрытия, обивочные ткани, бетон, резина, пластик, кафель, фарфор, фаянс и другие);
- средство полностью биоразлагаемо и экологически безопасно;
- сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания;
- рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны;
- при контакте с остаточными количествами мыла и анионных поверхностно-активных веществ дезинфицирующие свойства растворов препарата «АБАКТЕРИЛ» сохраняются;
- низкотоксичен;
- не требует ротации.



АБАКТЕРИЛ КЛИНЕР

Объёмы:

0.2 л, 1 л, 5 л.

Состав:

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин, nПАВ и др. функциональные компоненты.

Антимикробная активность в отношении:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза *M. terrae*), ВБИ, кишечных инфекций, легионеллёза, анаэробных инфекций;
- вирусов (рино-, норо-, рото-, адено-вирусов, коронавирусов, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ-инфекций, вирусов гриппа и парагриппа человека, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции и т.д.), фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств

Средство предназначено для:

- **дезинфекция+ мытье** и дезодорирование поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, сантехоборудования, белья, посуды, резиновых и полипропиленовых ковров, обуви, уборочного инвентаря и материала, игрушек, спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в ЛПУ и ЛПО, детских и пени-тенциарных учреждениях, коммунальных учреждениях, на предприятиях общепита; дезинфекция кузевов и приспособлений к ним;
- **дезинфекция комплектующих деталей** наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, УЗИ-датчиков;
- **дезинфекция медицинских изделий**, в т.ч. совмещённой с ПСО, эндоскопы;
- **предстерилизационная очистка**;
- **дезинфекция медицинских, пищевых и прочих отходов**;
- **дезинфекция крови**;
- **дезинфекция поверхности скорлупы яиц**.



ХОРТ ТАБЛЕТКИ

Упаковка:

20 бан. по 50 таб. массой 1,0 г
20 бан. по 150 таб. массой 1,0 г
10 бан. по 300 таб. массой 1,0 г

ДВ: ПГМГ, ЧАС

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *M.terrae*), легионеллеза, туляремии, особо опасных инфекций – чумы, холеры
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Точность и легкость дозирования:
-1 таб./10 л. – бактериальный режим;
-2 таб./10 л. – вирусный режим;
- Совместимость с обрабатываемыми материалами
- Возможность многократного использования (в течение 28 суток)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция + мытье:** поверхностей в помещениях, жесткой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, приборов, оборудования; включая отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции лёгких; куветов; санитарно-технического оборудования, в т.ч. акриловых ванн; посуды в т.ч. лабораторной, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
- **дезинфекция пищевых яиц;** воздуха, медицинских отходов класса Б и В; выделений больного и биологических жидкостей, остатков пищи;
- **Дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения, ручным и механизированным способами (ультразвуковая обработка): хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем; плевательниц;
- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий.

Режимы дезинфекции:

Поверхности

Бактериальный – 0,01%/0,02%/0,04%/0,1% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусный – 0,02%/0,05%/0,1%/0,4% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Туберкулезный - 0,08%/0,1%/0,2%/0,4% - 90 мин./60 мин./30 мин./15 мин.

Дезинфекция ИМН+ПСО

Вирусный - 0,05%/0,1%/0,2% - 60 мин./30 мин./15 мин.
Туберкулезный – 0,2%/0,3%/0,4% - 90 мин./60 мин./30 мин.



РЕМЕДИН АМИН

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: амин

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 30 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

• дезинфекция и мытье:

- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования, куветы;
- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
- мусороборочного оборудования и мусоросборников;
- пищевых яиц, холодильного и морозильного оборудования;

• дезинфекция:

- медицинских отходов класса Б и В;
- крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
- датчики УЗИ;

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):

- всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;

• проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием уборочных технологий;

• борьба с плесневыми грибами.

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии – 0,2%/0,4%/0,8%/2,0%/-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусы – 1,0%/2,0%/3,0%/4,0%/-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Микобактерии туберкулеза – 4,0%/6,0%/8,0%-120 мин./60 мин./30 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

2,0%/3,0%/4,0%-60 мин./30 мин./15 мин.
2,0%/3,0%/5,0%/7,0%-120 мин./60 мин./30 мин./15 мин.



DEZOPHARM

**СРЕДСТВА
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИИ**



АЛЬФАДЕЗ

Упаковка:

10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, ПГМГ

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *M.terrae*), легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и мытье** поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования, включая куветы; лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря; систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка): всего спектра хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **дезинфекция** медицинских отходов класса Б и В, накопительных баков автономных туалетов;
- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режимы дезинфекции:

Поверхности

Бактериальный – 0,1%/0,25% - 120 мин./60 мин.
Вирусный – 0,25%/0,5% - 60 мин./30 мин.
Туберкулезный – 0,5% - 120 мин.

Дезинфекция ИМН + ПСО

Бактериальный -
Вирусный – 1,0% - 60 мин.
Туберкулезный – 2,0%/2,5% - 30 мин./90 мин



ЭКОБРИЗ КОНЦЕНТРАТ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, амины

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция + уборка:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, приборов, оборудования, **включая отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких, куветы;**
 - лабораторной и столовой посуды (режим совмещения обезжиривания и дезинфекции), белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
- **дезинфекция** медицинских отходов класса Б и В;
- **борьба с плесневыми грибами;**
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, плевательниц;
- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии – 0,05% / 0,1% / 0,5% – 60 мин. / 30 мин. / 5 мин.
Вирусы – 0,25% / 0,5% / 1% – 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза – 0,5% – 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

0,25% / 0,5% / 1% – 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
0,5% / 1,0% / 1,5% – 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.



ЭКОБРИЗ ОКСИ

Упаковка:

10 фл. по 1,0 л, крышка

ДВ: перекись водорода, ПГМГ

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных, анаэробных инфекций, туберкулеза – тестировано на *M.terrae*, легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Эффективно удаляет пятна белковых отложений и других трудно удалимых веществ с поверхностей из любых материалов
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
- всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, стоматологических наконечников для бормашин и турбин;
- **дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов жестких и гибких;**
- **дезинфекция и мытье:**
- поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования (включая куветы), отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких;
- лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- **дезинфекция медицинских отходов класса Б, В;**
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий.

Режимы дезинфекции:

Поверхности

Бактерии — 0,1% / 0,5% / 1,0% — 120 мин. / 60 мин. / 30 мин.
Вирусы — 0,1% / 0,5% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / 1,0% — 120 мин. / 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

0,1%/0,5% / 1% / 2% — 90 мин. / 60 мин. / 15 мин. / 5 мин.
0,5% / 1% / 2% — 90 мин. / 60 мин. / 15 мин.

ДВУ:

4% — 5 мин



ЭКОБРИЗ ОКСИ ЛАЙТ

Упаковка:

10 фл. по 1,0 л, крышка

ДВ: перекись водорода, комплекс ЧАС

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза – тестировано на *M.terrae*, туляремии, легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, сибирской язвы, анаэробных инфекций)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий
- **дезинвазионные свойства** в отношении возбудителей кишечных простейших и гельминтозов (чисты и ооцисты простейших, яйца, онкосферы и личинки гельминтов (включая острицы))

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Эффективно удаляет пятна белковых отложений и других трудно удалимых веществ с поверхностей из любых материалов
- Возможность многократного использования (в течение 28 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
- всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
- эндоскопов жестких и гибких;
- оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, стоматологических наконечников для бормашин и турбин;
- **дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов жестких и гибких;**
- **стерилизация изделий медицинского назначения;**
- **дезинфекция и мытье (обезжиривание)**, в т.ч. совмещенные в один процесс, ручным и механизированным способами **молочной, столовой, чайной, лабораторной посуды, сосок, молокоотсосов, воронок и пр.;**
- **дезинфекция** белья, уборочного инвентаря, медицинских отходов класса Б, В; биологических выделений, воздуха;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **дезинвазия почвы**, предметов обихода, игрушек, помещений, лабораторного оборудования и посуды.

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1% / 0,2% / 0,4% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Вирусы — 0,1% / 0,25% / 0,5% / 2,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% / 1,0% / 2,0% — 120 мин. / 60 мин. / 30 мин.

Дезинфекция ИМН + ПСО:

0,25%/0,5%/1,0%/2,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.
0,25%/0,5%/1,0%/2,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин. / 5 мин.

ДВУ:

5% — 15 мин.

Стерилизация:

5%-480 мин 10%-180 мин.



ХОРТ СТОМА

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМБ, синергисты биоцидов

Антимикробная активность:

- бактерии, включая микробактерии туберкулеза
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств, в т.ч. относительно белковых отложений
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- Дезинфекция и очистка стоматологических материалов, в т.ч. оттисков, изделий для протезирования из полиэфира, силиконов, альгинатов, гидроколлоидов и пр.; зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и др. материалов; артикуляторов, слепочных ножек и пр.; отсасывающих систем;
- Дезинфекция стоматологических наконечников;
- Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, стоматологических инструментов из различных материалов, включая вращающиеся (боры зубные твердосплавные, головки стоматологические алмазные, дрельборов зубных, каналонакопители, фрезы); имеющих замковые части, в т.ч. стоматологических щипцов; каналы или полости, зеркала с амальгамой ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках любого типа.

Режимы дезинфекции:

Дезинфекционная выдержка при обработке любых изделий составляет 5 мин.
2% - 10 – 15 мин.



МИРАЦИД

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, органические кислоты, ПГМБ

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на M.tetragae, внутрибольничных и анаэробных инфекций)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые
- дезинвазионные свойства в отношении возбудителей кишечных простейших и гельминтозов (цисты и ооцисты простейших, яйца, онкосферы и личинки гельминтов (включая острицы))

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Нейтрализует неприятные запахи
- Возможность многократного использования
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В; биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты);
 - воздуха;
- **дезинвазия:**
 - почвы, предметов обихода, игрушек, помещений, лабораторного оборудования и посуды;
- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, мебели, приборов, оборудования (вкл. куветы), отдельных узлов и блоков аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких, акриловых ванн;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
- **борьба с плесневыми грибами;**
- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1% / 0,2%/0,25% / 0,5% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин./5 мин.
Вирусы — 0,5% / 0,8% / 1,0% — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
Микобактерии туберкулеза — 1,5% / — 60 мин.

Дезинфекция ИМН + предстерилизационная очистка:

0,5% / 1,0% / 2,0 % — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.
4,0% — 30 мин



РЕМЕДИН ОКСИ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ПВ, комплекс ЧАС и производных гуанидина

Антимикробная активность:

- **бактерии** (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на M.terrae, tuberculosis, чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, легионеллеза)
- **вирусы** (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- **патогенные грибы**, включая плесневые
- споры бактерий
- цисты и ооцисты простейших, яйца, онкосферы и личинки гельминтов (включая острицы).

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **Дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования; кувезы;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
 - холодильных и морозильных установок;
- **пищевых яич;**
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
 - датчики УЗИ;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;
- **дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;**
- **стерилизации медицинских изделий из коррозионно-стойких материалов;**
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

Режимы дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,1%/0,2%/0,4%/0,8% - 60 мин./ 30 мин./ 15 мин./ 5 мин.
Вирусы — 0,1%/0,25%/0,5%/2,0% - 60 мин./ 30 мин./ 15 мин./ 5 мин.
Микобактерии туберкулеза — 3,0%/4,0%/5,0%/6,0% - 120 мин./ 60 мин./ 30 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

1,0%/2,0%/3,0% — 60 мин. / 30 мин./15 мин.
4,0%/5,0%/6,0%/7,0% — 120 мин. / 60 мин./30 мин./15 мин.



ЭНЗИМОДЕЗ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, ферментный комплекс (липаза, амилаза, протеаза), ПАВ, ингибитор коррозии

Антимикробная активность:

- бактерии, включая микобактерии туберкулеза)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая биологические пленки
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Возможность многократного использования (в течение 3 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способами:
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляторов из устойчивых к коррозии материалов, слепочных ложек и др., отсасывающих систем;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним;
- **предварительная и окончательная очистка эндоскопов** ручным способом;
- **предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенная с дезинфекцией, медицинских инструментов (включая стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, материалы) механизированным способом с использованием ультразвука в установках любого типа («Медэл», «Ультразэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

Режим дезинфекции:

Дезинфекция ИМН+предстерилизационная очистка

Вирусы — 0,5% - 15 мин./20 мин.
Микобактерии туберкулеза — 0,5% - 15 мин./20 мин.

Дезинфекция ИМН

0,25%/0,5% - 25 мин./15 мин.
0,25%/0,5% - 40 мин./20 мин.



МИРОДЕЗ СПЕЦИАЛЬ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ЧАС, комплекс ПАВ

Антимикробная активность:

- бактерии (искл. возбудителей туберкулеза)

Уникальные свойства:

- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Обладает чистящими и моющими свойствами
- Уничтожает пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых отложений и других трудноудаляемых веществ с поверхностей
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **влажная уборка структурных подразделений акушерского стационара;**
- **очистка и мытье** от комплексных загрязнений различного характера поверхностей:
 - оборудования, в т. ч. медицинского, санитарно-технического;
 - приборов, полов, стен из различных материалов: стекла, мрамора, гранита, керамической плитки, линолеума, ПВХ, окрашенных, деревянных, металлических и текстильных;
- **предстерилизационная очистка** изделий медицинского назначения, вкл. хирургические (в т. ч. микрохирургические) и стоматологические (в т. ч. вращающиеся) инструменты; жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним из различных материалов ручным способом; **предварительная очистка** эндоскопов и инструментов к ним; окончательная очистка эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ); **очистка гибких эндоскопов механическим способом** в установке КРОНТ-УДЭ-1;
- **предстерилизационная очистка** хирургических (включая микрохирургические) и стоматологических (включая вращающиеся), а также инструментов к эндоскопам механизированным способом в ультразвуковых установках;
- **дезинфекция и мытье:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, посуды;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- **проведение генеральных уборок** по бактериальному режиму, в т. ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,5% / 1,0% — 120 мин. / 60 мин.

Режимы очистки и мытья: 0,25% / 1,0%

Режимы предстерилизационной очистки

ПСО ИМН: 0,1% / 0,3% — 10 мин.:

ПСО эндоскопов 0,3% — 10 мин.

Режим влажной уборки отделений акушерского стационара 0,25



АБАКТЕРИЛ ОКСИ

Объемы:

1 л, 5 л.

Антимикробная активность в отношении:

грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая *Mycobacterium terrae*, возбудителей ВБИ, кишечные инфекции, вирусов, включая вирус полиомиелита, H5N1, H1N1, ВИЧ и пр., грибов рода *Candida*, *Trichophyton*, плесневых грибов, возбудителей ООИ — чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, анаэробных инфекций, возбудителей легионеллеза.

Состав:

в качестве действующих веществ содержит глутаровый альдегид 8 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) — 15 %, молочную кислоту — 1,0 %, а также вспомогательные компоненты: неионогенные ПАВ, антикоррозийную добавку. Показатель активности водородных ионов (pH) 1% раствора средства $3,5 \pm 1,0$.

Уникальные свойства:

- полный спектр антимикробной активности,
- борьба с плесенью,
- генеральные уборки.

Средство предназначено для:

- **дезинфекция**, в том числе совмещенная с ПСО, инструментов и эндоскопов,
- **предстерилизационная очистка,**
- **стерилизация медицинских изделий**, включая хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам,
- **ДВУ эндоскопов,**
- **дезинфекция и стерилизация** инструментов маникюрных, педикюрных, для косметических процедур,
- **дезинфекция различных поверхностей,**
- **обеззараживание медицинских и пищевых отходов,** биологических выделений.



РЕМЕДИН ФОРТЕ

ДВ: комплекс ЧАС, **глутаровый альдегид**

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *tuberculosis*, чумы, холеры, туляремии, легионеллеза)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы, включая плесневые

Уникальные свойства:

- Наличие моющих свойств и отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100.

Средство предназначено для:

- **Дезинфекции + уборка:**
 - поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования;
 - лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
 - мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
 - фармацевтических холодильных установок;
- **дезинфекция:**
 - медицинских отходов класса Б и В;
 - крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови;
- датчики УЗИ;
- **дезинфекция + предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка):
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - эндоскопов жестких и гибких;
 - оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем.

Режимы дезинфекции:

Поверхности:

Бактерии — 0,05%/0,1%/0,2%/0,4%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
 Вирусы — 0,4%/0,8%/1,5%/2,0%-60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
 Микобактерии туберкулеза — 5,0%/ 6,0%/8,0% / — 60 мин. / 30 мин. / 15 мин.

Дезинфекция МИ + ПСО:

0,5%/1,0%/2,0%-60 мин./30 мин./15 мин.
 2,0%/3,0%/5,0%/7,0%-120 мин./60 мин./30 мин./15 мин.



МИРОДЕЗ ОРТО

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
 3 кан. по 3,8 л, крышка

ДВ: ортофталевый альдегид (0,6%), синергисты биоцидов, стабилизаторы, ингибиторы коррозии, pH 6,5-8,0

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулёза (тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы
- споры бактерий

Преимущества:

- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Возможность многократного использования (в течение 28 суток)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- дезинфекция медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках) способами;

Режимы обработки:

(при температуре рабочего раствора не менее 20°C)

Дезинфекция - 5-10 мин. (туберкулез)

ДВУ - 5 мин



DEZOPHARM

**КОЖНЫЕ
АНТИСЕПТИКИ**



ЭКОБРИЗ АНТИСЕПТИК

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
24 фл. по 500 мл., диспенсер
20 фл. по 200 мл., колпачок с контролем вскрытия
20 фл. по 200 мл., спрей
65 фл. по 100 мл., спрей
90 фл. по 75 мл., спрей

ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, увлажняющие компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (включая микобактерии туберкулёза)
- вирусы (гепатит В, ВИЧ)
- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие

Уникальные свойства:

- Содержат в составе увлажняющие кожу компоненты
- Не содержат красителей
- Не вызывают раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала ЛПО;
- обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров.



ЭКОБРИЗ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
24 фл. по 500 мл., диспенсер
20 фл. по 200 мл., колпачок с контролем вскрытия

ДВ: изопропанол, комплекс ЧАС, увлажняющие компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (включая микобактерии туберкулёза)
- вирусы (гепатит В, ВИЧ)
- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие

Уникальные свойства:

- Содержат в составе увлажняющие кожу компоненты
- Не содержат красителей
- Не вызывают раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала ЛПО.



МИРОДЕЗ МУСС

Упаковка:

10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
36 фл. по 250 мл. с пенообразователем

ДВ: ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. микобактерии туберкулёза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Содержит в составе увлажняющие кожу

компоненты

- Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции
- Сохраняет эффективность при замораживании и последующем оттаивании
- Остаточное антимикробное действие не менее 5 часов

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств;
- обработка локтевых сгибов доноров;
- обработка кожи операционного и инъекционного полей;
- для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;
- гигиеническая обработка рук:
- медицинского персонала ЛПО;
- работников парфюмерно-косметических, фармацевтических и микробиологических предприятий, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных служб.



МИРОСЕПТИК

ДВ: изопропиловый, пропиловый спирты, комплекс ЧАС, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. микобактерии туберкулёза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты
- Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции
- Остаточное антимикробное действие не менее 3 часов

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств;
- обработка локтевых сгибов доноров;
- обработка кожи операционного и инъекционного полей;
- обработка кожных покровов перед введением катетеров и пункцией суставов;
- гигиеническая обработка рук:
- медицинского персонала ЛПО;
- работников парфюмерно-косметических, фармацевтических и микробиологических предприятий, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных служб.



МИРОСЕПТИК ЭКСПРЕСС

Упаковка:

- 3 кан. по 5,0 л, крышка
- 10 фл. по 1,0 л, диспенсер
- 10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
- 14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
- 24 фл. по 0,5 л, диспенсер
- 20 фл. по 200 мл, спрей
- 65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: изопропиловый, пропиловый спирты, хлоргексидин биглюканат

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. микобактерии туберкулёза- тестировано на M. terrae)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты
- Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
- Экспресс обработка рук хирургов за 1,5 мин. (3мл x 2)
- Остаточное антимикробное действие не менее 5 часов.

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств;
- гигиеническая обработка рук;
- обработка кожи инъекционного поля, в том числе места прививки;
- профилактическая обработка ступней ног;
- обработка перчаток, надетых на руки персонала.



РЕМЕДИН АНТИСЕПТИК

Упаковка:

- 10 фл. по 1,0 л, диспенсер
- 10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
- 14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
- 24 фл. по 500 мл, диспенсер
- 65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, увлажняющие компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (включая микобактерии туберкулёза)
- вирусы (гепатит В, ВИЧ)
- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие

Уникальные свойства:

- Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты
- Не содержит красителей
- Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала ЛПО;
- обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров.



ХОРТ АНТИСЕПТИК

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л., крышка
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., стилинга
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак
10 фл. по 0,75 л., с триггером
20 фл. по 200 мл., флип-топ
20 фл. по 200 мл., спрей
65 фл. по 100 мл., спрей
90 фл. по 75 мл., спрей
24 фл. по 0,5 л., диспенсер

ДВ: изопропиловый спирт -70% мас. (77% об.), перекись водорода – 0,5%, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*)
- вирусы (вкл. возбудителей полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, острых респираторных вирусных инфекций, вкл. Covid-19, вирусов герпеса, аденовирусов и т.д.)
- патогенные грибы (в том числе возбудителей дерматофитий и кандидозов, плесневых грибов)
- остаточное антимикробное действие не менее 3 часов

Уникальные свойства:

- Содержат в составе увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты
- Не вызывают раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции – 3 мл дважды с экспозицией 1 мин.;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала МО;
- обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров;
- дезинфекция небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей; стоматологических наконечников, датчиков УЗИ; поверхностей медицинского оборудования и приборов;
- использования в диспенсерах-контейнерах «Дезупак» для дезинфекции поверхностей и объектов способом протирания.

Режим дезинфекции:

Бактерии - 0,5 мин
Вирусы - 3 мин
Патогенные грибы - 3-5 мин
Микобактерии туберкулеза - 3-5 мин



АБАКТЕРИЛ ИПС-75

Объёмы:

0.1 л; 0.5 л; 1 л.

Состав: изопропиловый спирт – 75%, смесь ЧАС-0,2%, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты и др. функциональные добавки.

Антимикробная активность в отношении:

грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая *Mycobacterium terrae*), возбудителей ВБИ, кишечных инфекций, всех видов вирусов, включая коронавирусы, полиомиелит, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и т.д., легионеллеза, ООИ – чумы, холеры, туляремии, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов.

Уникальные свойства:

- полный спектр антимикробной активности;
- не требует предварительного мытья рук водой и мылом;
- даже после многократного применения не вызывает раздражения кожи, т.к. содержит в своём составе увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты;
- используется в качестве кожного антисептика и для дезинфекции поверхностей;
- разрушает на поверхности биологические плёнки;
- обладает обезжиривающим и дезодорирующим действием;
- используется для экстренной дезинфекции поверхностей, в том числе труднодоступных;
- средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхностях;
- не требует смывания после обработки;
- пролонгированное антимикробное действие в течение 4 часов.

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала МО;
- обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров.



РЕМЕДИН АНТИСЕПТИК ЛЮКС

Упаковка:

- 10 фл. по 1,0 л, диспенсер
- 10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
- 14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа
- 24 фл. по 500 мл, диспенсер
- 65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, производные гуанидина, амин, ухаживающие и увлажняющие компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M. terrae, tuberculosis*,
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы
- остаточное антимикробное действие не менее 3 часов

Уникальные свойства:

- Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции

Средство предназначено для:

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала МО;
- обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров;
- дезинфекция небольших по площади поверхностей;
- медицинских изделий.



АБАКТЕРИЛ АКТИВ

Объёмы:

50 мл; 0,1 л; 0,2 л; 0,5 л; 0,75 л; 1 л; 5 л.

Состав: изопропиловый спирт — 64,0% алкилдиметилбензиламмоний хлорид — 0,1%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид — 0,1%, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, функциональные добавки.

Антимикробная активность:

в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулёза — тестировано на *M. terrae*), вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), герпеса, вирусов гриппа, в том числе гриппа H1N1, гриппа H5N1 и др.) и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 6 часов.

Уникальные свойства:

- пролонгированное антимикробное действие в течение 6 часов;
- полный спектр антимикробной активности;
- борьба с плесенью;
- одновременно чистит и дезинфицирует обрабатываемые поверхности;
- даже после многократного применения не вызывает раздражения кожи, т. к. содержит в своём составе увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты;
- быстро высыхает на руках, не оставляя чувства липкости;
- не требует предварительного мытья рук водой и мылом;
- в качестве дезинфектанта для поверхностей используется для экстренной обработки небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях;
- эффективен для обеззараживания перчаток;
- используется для обеззараживания обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- облегчает и ускоряет удаление жировых и пигментирующих загрязнений (в том числе застарелых) на обрабатываемых поверхностях.

Средство предназначено для:

- дезинфекции поверхностей
- дезинфекция рук.



ФИОН АНТИСЕПТИК

Форма выпуска:

фл. 100мл | фл 200мл | фл 500мл | фл.1 л | кан.5 л.

Состав: изопропиловый спирт (2-пропанол) - 63% мас. (70% об.), а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*
- вирусы включая возбудителей полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и другие возбудители острых респираторных инфекций, цитомегаловирусы, энтеровирусы, норовирусы, ротавирусы, вирусы герпеса, Коксаки, ЕСНО.
- патогенные грибы

Назначение:

- гигиеническая обработка рук, в т.ч. для профилактики Covid-19 ;
- обработка ступней ног для профилактики грибковых заболеваний;
- обработка перчаток;
- обработка небольших по площади поверхностей;
- применение средства в диспенсерах-контейнерах для салфеток «Дезупак»
- пролонгированное антимикробное действие не менее 3-х часов

Режимы дезинфекции поверхностей и рук:

Поверхности - 30сек-3мин

Руки – 30сек



ФИОН АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ

Форма выпуска

фл. 100мл | фл 200мл | фл 500мл | фл.1 л | кан.5 л.

Состав: изопропиловый спирт (2-пропанол) – 63% мас. (70% об.), а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты

Антимикробная активность:

- бактерии включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*
- вирусы включая возбудителей полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и другие возбудители острых респираторных инфекций, Коксаки, вирусы герпеса, норовирусы, ротавирусы, энтеровирусы, цитомегаловирусы, ЕСНО.
- патогенные грибы.

Назначение:

- гигиеническая обработка рук, в т.ч. для профилактики Covid-19 ;
- обработка ступней ног для профилактики грибковых заболеваний;
- обработка перчаток;
- пролонгированное антимикробное действие не менее 3-х часов

Режимы дезинфекции поверхностей и рук:

Руки – 30 сек



АВАНДЕЗ

ДВ: спирт изопропиловый – 70,0%, 2-фенокси-этанол – 0,2%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,05%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

Антимикробная активность в отношении:

в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*, возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ) – тестировано на *Pseudomonas aeruginosa*, кишечных инфекций – *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*, метициллин-резистентный стафилококк и ванкомицин-резистентный энтерококк); вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека (в том числе рино-, коро-, рото-, аденовирусов, коронавирусов, полиомиелита, вирусов энтеральных и парентеральных

гепатитов (в т. ч. гепатита А, В, С, D), энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, вирусов гриппа и парагриппа человека, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и т.д.); фунгицидной активностью в отношении грибов рода *Candida*, *Trichophyton*, плесневых грибов (в том числе *Aspergillus brasiliensis*, *Mucor spp.* и др.), активностью в отношении возбудителей легионеллеза и особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии).

Средство предназначено для:

- гигиенической обработки рук;
- обработки рук хирургов;
- экстренной дезинфекции различных поверхностей и предметов;
- дезинфекции ИМН, санитарно-технического оборудования, парикмахерских инструментов, обуви, СИЗ и др.



DEZOPHARM

**ЭКСПРЕСС
ДЕЗИНФЕКЦИЯ**



ЭКОБРИЗ СПРЕЙ

ДВ: изопропиловый спирт, ЧАС

Антимикробная активность в отношении:

- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза, тестировано на M.terrae)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Экспресс экспозиция 30 сек. — 5 мин.
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

Средство предназначено для:

- дезинфекция небольших по площади поверхностей в помещениях, в т. ч. труднодоступных;
- дезинфекция предметов обстановки (в т. ч. бактерицидных ламп);
- дезинфекция оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ и пр.;
- дезинфекция предметов ухода за больными, тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви;
- дезинфекция резиновых перчаток (из хлоропренового каучука или латекса).

Режим дезинфекции:

Бактерии — 0,5 мин. — 1,0 мин.

Вирусы — 0,5 мин. — 1,0 мин. — 3 мин.

Патогенные грибы — 3 мин. — 5 мин.

Микобактерии туберкулеза — 5 мин.



МИРОДЕЗ СПРЕЙ

ДВ: комплекс ЧАС, ПАВы

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Экспресс экспозиция **30 сек. — 3 мин.**
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Активно разрушает на поверхностях биологические пленки и обладает хорошими моющими свойствами
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и мытье датчиков УЗИ;** стетоскопов и фонендоскопов; стоматологических нако-нечников;
- **дезинфекция и мытье поверхностей** медицинского оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования;
- **дезинфекция и мытье куветов** для новорожденных и детских кроваток;
- **дезинфекция и очистка поверхностей** в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;
- **дезинфекция и мытье предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;
- **дезинфекция и мытье оборудования** и поверхностей машин скорой помощи и санитарного транспорта.

Режим дезинфекции:

Бактерии — 0,5 мин.

Вирусы — 3 мин

Патогенные грибы — 3 мин.

Микобактерии туберкулеза — 3 мин



ХОРТ СПРЕЙ

Упаковка:

10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: изопропиловый спирт, ЧАС, ПГМБ, амин

Антимикробная активность:

- бактерии, вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза (тестировано на штамме M.terrae), легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии
- вирусы, вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций – полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Экспресс экспозиция 1 – 5 мин.
- Не требует смывания после обработки, за исключением кузевов, объектов, соприкасающихся с пищевыми продуктами и пр.
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях

Средство предназначено для:

- **дезинфекция датчиков УЗИ;** стетоскопов и фонендоскопов; стоматологических наконечников;
- **дезинфекция поверхностей** медицинского оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования;
- **дезинфекция кузевов** для новорожденных и детских кроваток;
- **дезинфекция поверхностей** в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;
- **дезинфекция предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;
- **дезинфекция оборудования** и поверхностей машин скорой помощи и санитарного транспорта;
- **гигиеническая обработка рук, ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.**

Режим дезинфекции:

Бактерии - 1 мин
Возбудители ООИ - 3 мин.
Вирусы - 3 мин.
Патогенные грибы - 3 мин.-5 мин.
Микобактерии туберкулеза - 5 мин.



ХОРТ АКТИВ СПРЕЙ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, с триггером
10 фл. по 0,75 л, с триггером

ДВ: перекись водорода-1,6%, гликолевая кислота – 2,1%, усиливающие добавки, минеральные и органические активаторы перекиси, неионогенные ПАВ, антикоррозионные компоненты.

Антимикробная активность:

- Бактерии, вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза (тестировано на M.terrae, M.tuberculosis)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций – полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа, коронавирусов и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий

Уникальные свойства:

- Экспресс экспозиция при бактериальных (кроме возбудителей туберкулеза) и вирусных инфекциях 3 мин. – 5 мин.
- Не фиксирует органические загрязнения; обладает хорошими моющими и чистящими свойствами.
- Не портит и не обесцвечивает обрабатываемые объекты из различных пластмасс, нержавеющей стали, стекла, керамики, резин.
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и мытье датчиков УЗИ;** стетоскопов и фонендоскопов; стоматологических наконечников, глюкометров;
- **дезинфекция и мытье поверхностей** медицинского оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования;
- **дезинфекция и мытье кузевов** для новорожденных и детских кроваток;
- **дезинфекция и очистка поверхностей** в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;
- **дезинфекция и мытье предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви;
- **дезинфекция и мытье аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;**
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка** медицинских изделий;
- **дезинфекция и мытье оборудования** и поверхностей машин скорой помощи и санитарного транспорта.

Режим дезинфекции:

Бактерии - 3 мин
Вирусы - 5 мин.
Патогенные грибы - 10 мин.-15 мин.
Микобактерии туберкулеза - 30 мин.
Анаэробные бактерии в спорной форме - 60 мин.



РЕМЕДИН СПРЕЙ

ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, производные гуанидина, молочная кислота

Антимикробная активность в отношении:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *tuberculosis*, легионеллеза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Экспресс экспозиция 1 мин. — 5 мин.
- Не требует смывания после обработки
- Безопасность применения

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и мытье датчиков УЗИ;** стетоскопов и фонендоскопов; стоматологических наконечников;
- **дезинфекция и мытье поверхностей** медицинского оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования;
- **дезинфекция и мытье куветов** для новорожденных и детских кроваток;
- **дезинфекция и очистка поверхностей** в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;
- **дезинфекция и мытье предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковров, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;
- **дезинфекция и мытье оборудования** и поверхностей машин скорой помощи и санитарного транспорта;
- **гигиеническая обработка рук, ступней ног, перчаток.**

Режим дезинфекции:

Бактерии — 1,0 мин.

Вирусы — 3-5 мин.

Патогенные грибы — 3-5 мин.

Микобактерии туберкулеза — 5 мин. (двукратное протирание или орошение)



РЕМЕДИН СПРЕЙ ЛАЙТ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка

10 фл. по 1,0 л, с триггером

10 фл. по 0,75 л, с триггером

65 фл. по 100 мл, спрей

ДВ: комплекс ЧАС, амин, производные гуанидина

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *tuberculosis*, легионеллеза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Экспресс экспозиция 1 мин. — 5 мин.
- Полная совместимость с обрабатываемыми поверхностями
- Активно разрушает на поверхностях биологические пленки и обладает хорошими моющими свойствами
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и мытье датчиков УЗИ;** стетоскопов и фонендоскопов; стоматологических наконечников;
- **дезинфекция и мытье поверхностей** медицинского оборудования и приборов, в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования;
- **дезинфекция и мытье куветов** для новорожденных и детских кроваток;
- **дезинфекция и очистка поверхностей** в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;
- **дезинфекция и мытье предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковров, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;
- **дезинфекция и мытье оборудования** и поверхностей машин скорой помощи и санитарного транспорта;
- **гигиеническая обработка рук, ступней ног, перчаток.**

Режим дезинфекции:

Бактерии — 1,0 мин.

Вирусы — 3-5 мин.

Патогенные грибы — 3 мин.

Микобактерии туберкулеза — 5 мин. (двукратное протирание или орошение)

The background features a series of thin, light blue diagonal lines in the upper left corner. Below these, there are large, overlapping geometric shapes: a teal triangle on the left, a dark blue triangle in the center, and a dark purple triangle on the right. A thin horizontal line is positioned below the main title.

DEZOPHARM

**ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ**



АЛЬФАДЕЗ ОРТО

Упаковка

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: ортофталевый альдегид, комплекс ЧАС

Антимикробная активность в отношении:

- бактерии, включая микробактерии туберкулеза
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:

- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **Дезинфекция высокого уровня** (ДВУ) эндоскопов жестких и гибких;
- **Стерилизация изделий медицинского назначения** из металлов, пластмасс, резин на основе каучука, стекла, в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов; жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;

Режимы обработки (при 18° С):

ДВУ – 10%-5 мин
Стерилизация 10% - 60 мин.



АЛЬФАДЕЗ ФОРТЕ

Упаковка

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, глутаровый альдегид, глиоксаль

Антимикробная активность:

- бактерии, включая микробактерии туберкулеза (тестировано на M. Terae), возбудителей особо опасных инфекций - чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы, включая плесневые
- споры бактерий

Уникальные свойства:

- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция высокого уровня** (ДВУ) эндоскопов жестких и гибких;
- **стерилизация изделий медицинского назначения** из металлов, пластмасс, резин на основе каучука, стекла, в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов; жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- **дезинфекция** изделий медицинского назначения, поверхностей в помещениях, аппаратов, приборов, жесткой мебели; наружных поверхностей приборов и аппаратов, санитарно – технического оборудования, лабораторной посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря; медицинских отходов класса Б и В;
- **борьба с плесневыми грибами;**
- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий.

Режимы:

Дезинфекция поверхностей:

Бактериальный - 0,05%/0,1%/0,2%/0,3%/- 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.
Вирусный - 0,5%/0,1% - 60мин./30мин.
Туберкулезный - 0,5%/2,0% - 60 мин./15мин.
ООИ (чума, холера, туляремия) - 0,3%/0,5% - 60 мин./30 мин.
Сибирская язва - 10% - 60 мин.

Дезинфекция ИМН:

Вирусный - 0,1%/0,2%/0,3%/0,5% - 90 мин./60 мин./ 30 мин./15 мин.
Туберкулезный - 0,5%/ 1,0%/2,0% - 90 мин./30 мин./15 мин.

ДВУ при 20 °С: 20% - 5 мин.

Стерилизация при 20 °С: 20% - 60 мин.



АЛЬФАДЕЗ ОКСИ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка (вместимостью 3,8л.)

ДВ: перекись водорода; надуксусная кислота

Антимикробная активность:

- бактерии включая возбудителей туберкулеза
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота- и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:

- Совместимость с обрабатываемыми материалами
- Средство сохраняет свои свойства после заморзания и последующего оттаивания
- Возможность многократного использования (в течение 31 суток)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция высокого уровня** (ДВУ) эндоскопов жестких и гибких;
- **стерилизация изделий медицинского назначения** из металлов, пластмасс, резин на основе каучука, стекла, в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Режимы обработки (при 18°C):

ДВУ — 5 мин.

Стерилизация — 15 мин.



МИРОКСИД -2000

Упаковка:

Базовый раствор: 3 кан. по 5,0л, крышка

с дегазирующим клапаном

Активатор: 3 фл. по 61,3гр.

ДВ: активированный раствор надуксусной кислоты

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:

- pH 5,0-7,0
- Совместимость с обрабатываемыми материалами*
- Безопасность
- Возможность многократного использования (в течение 21 дня)
- Индикаторные полоски №25
- * заключение ФБГУ ВНИИИ медицинской техники Росздравнадзора, рекомендации KARL STORZ-ENDOSKOPE

Средство предназначено для:

- **дезинфекция** изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические, стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструментов к ним;
- **дезинфекция высокого уровня** (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов;
- **стерилизация изделий медицинского назначения** из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним

Режим дезинфекции:

(при температуре рабочего раствора не менее 18°)

Дезинфекция ИМН — 5 мин.

ДВУ — 5 мин.

Стерилизация — 15 мин



ХОРТ СТЕРИЛ КОНЦЕНТРАТ

Упаковка

10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
3 кан. по 5,0 л., крышка
дозатор пластиковый для 5 л. канистры (по заказу)

ДВ: глутаровый альдегид (25%), синергисты биоцидов, стабилизаторы, ингибиторы коррозии, pH 3,5

Антимикробная активность в отношении:

- бактерии, включая возбудителей туберкулёза (тестировано на *M.terrae*), особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы
- споры бактерий

Уникальные свойства:

- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Возможность многократного использования (в течение 30 дней)
- Индикаторные полоски №25

Средство предназначено для:

- **дезинфекция** изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические, стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструментов к ним;
- **дезинфекция высокого уровня (ДВУ)** жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках) способами;
- **стерилизация изделий медицинского назначения** из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным и механизированным (в специализированных установках) способами;

Режимы обработки (при температуре рабочего раствора не менее 20°C)

Дезинфекция ИМН - 5% - 10 мин., 8% - 5 мин

ДВУ - 8% - 10 мин., 10% - 5 мин.

Стерилизация ИМН - 8% - 240 мин., 10% - 60 мин.



ЭНЗИМОСЕПТ

Упаковка

3 кан. По 5,0 л, крышка
10 фл. По 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
Дозатор пластиковый для 5 л

ДВ: комплекс ферментов (протеаза, липаза и амилаза), ПАВ

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая биологические пленки
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Продление срока эксплуатации инструментария

Средство предназначено для:

- предстерилизационная очистка (ПСО) ИМН, включая хирургические и стоматологические инструменты; жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках;
- предварительная очистка эндоскопов;
- окончательная очистка эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ)

Режимы обработки:

ПСО ИМН и инструментов к эндоскопам 0,5%/1,0% - 10 мин.

ПСО и окончательная очистка эндоскопов 0,5% - 10 мин.

ПСО ИМН и инструментов к эндоскопам

В УЗО 0,5% - 5 мин./10 мин./15 мин.



ЭНЗИМОДЕЗ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л, крышка
10 фл. по 1,0 л, колпачок с контролем вскрытия
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, ферментный комплекс (липаза, амилаза, протеаза), ПАВ, ингибитор коррозии

Антимикробная активность:

- бактерии, включая микобактерии туберкулеза)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Безопасность применения
- Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая биологические пленки
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Возможность многократного использования (в течение 3 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

Средство предназначено для:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способами:
- всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
- оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляторов из устойчивых к коррозии материалов, слепочных ложек и др., отсасывающих систем;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним;
- **предварительная и окончательная очистка эндоскопов** ручным способом;
- **предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенная с дезинфекцией, медицинских инструментов (включая стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, материалы) механизированным способом с использованием ультразвука в установках любого типа («Медэл», «Ультразвук», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

Режимы дезинфекции

Спектр активности:

Вирусный
Туберкулезный

Дезинфекция ИМН+ПСО:

Ручным способом:

0,5% — 15 мин/20 мин.

Механизированным способом (с использованием УЗО):

0,5% — 10 мин.

Режим предстерилизационной очистки:

ИМН:

0,25% — 5
мин / 10 мин.

Эндоскопы:

0,25% — 10 мин.



АБАКТЕРИЛ ФОРТЕ

Объёмы:

1 л, 5 л.

Антимикробная активность в отношении:

грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая *Mycobacterium terrae*, возбудителей ВБИ, кишечные инфекции, вирусов, включая вирус полиомиелита, H5N1, H1N1, ВИЧ и пр., грибов рода *Candida*, *Trichophyton*, плесневых грибов, возбудителей ООИ — чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, анаэробных инфекций, возбудителей легионеллеза. Спороцидная активность.

Состав:

в качестве действующих веществ содержит глутаровый альдегид 8 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) — 15 %, молочную кислоту — 1,0 %, а также вспомогательные компоненты: неионогенные ПАВ, антикоррозийную добавку. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства $3,5 \pm 1,0$.

Уникальные свойства:

- полный спектр антимикробной активности,
- борьба с плесенью,
- генеральные уборки.

Средство предназначено для:

- **дезинфекция**, в том числе совмещенная с ПСО, инструментов и эндоскопов,
- **предстерилизационная очистка**,
- **стерилизация медицинских изделий**, включая хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам,
- **ДВУ эндоскопов**,
- **дезинфекция и стерилизация** инструментов маникюрных, педикюрных, для косметических процедур,
- **дезинфекция различных поверхностей**,
- **обеззараживание медицинских и пищевых отходов**, биологических выделений.



АБАКТЕРИЛ ОКСИ

Объёмы:

1 л, 5 л.

Состав:

в качестве действующих веществ содержит: перекись водорода 18%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид суммарно 5,0%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 4,0%, а также стабилизатор перекиси, неионогенные поверхностно-активные вещества, антикоррозионные и другие функциональные добавки.

Антимикробная активность в отношении:

грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на микобактерии туберкулеза *Mycobacterium terrae*), возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ) – тестировано на *Pseudomonas aeruginosa*, кишечных инфекций – бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков в т. ч. метициллин-резистентный стафилококк и ванкомицин-резистентный энтерококк, сальмонелл; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, норовирусы, вирус полиомиелита, вирусы Коксаки, ЕСНО, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, кори, цитомегалии, атипичной пневмонии, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, ВИЧ и пр.), грибов рода *Candida*, *Trichophyton* и плесневых грибов (тестировано на *Aspergillus niger*), возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, анаэробных инфекций, возбудителей легионеллеза, спорозидной активности.

Уникальные свойства:

- борьба с плесенью,
- идеально для ротации,
- полностью биоразлагаемо и экологически безопасно,
- не требует смывания после обработки.

Средство предназначено для:

- дезинфекция, мойка и дезодорация в одном процессе различных поверхностей,
- дезинфекция, в том числе совмещённая с ПСО инструментов и эндоскопов.
- ПСО, стерилизация ИМН,
- ДВУ эндоскопов,
- дезинфекция и стерилизация инструментов парикмахерских, маникюрно-педикюрных кабинетов,
- обеззараживание медицинских и пищевых отходов,
- обеззараживание крови.



ЭНЗИМОДЕЗ ТРИО

Упаковка

3 кан. по 5,0л, крышка
10 фл. по 1,0 л, флип-топ
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

ДВ: амин, ЧАС, ПГМГ, мультиэнзимный синергетический комплекс стабилизированных жидких энзимов (альфа-амилаза, целлюлаза, протеаза, липаза, маннаназа, пектиназа) – 5,0%, протеаза – 1,0%, ПАВ, ингибитор коррозии

Антимикробная активность:

- бактерии, включая микобактерии туберкулеза (тестировано на *M. terrae*), возбудителей особо опасных инфекций;
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота- и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов, коронавирусов;
- патогенные грибы, вкл. плесневые.

Преимущества:

- активно **разрушает микробные ассоциации - биологические пленки** и **предотвращает** их образование на абиотических поверхностях, в т.ч. медицинского оборудования, инструментария, эндоскопического оборудования, мебели и пр.
- полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процесс, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способами:
 - всего спектра хирургических и стоматологических инструментов;
 - оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляторов из устойчивых к коррозии материалов, слепочных ложек и др., отсасывающих систем;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним;
- **предварительная и окончательная очистка эндоскопов** ручным способом;
- **предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенная с дезинфекцией, медицинских инструментов (включая стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, материалы) механизированным способом с использованием ультразвука в установках любого типа («Медэл», «Ультразэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

Режим дезинфекции Дезинфекция МИ + ПСО

Вирусный:

Ручным способом - 0,4% /0,8%/1,2%/1,5%-60 мин./30 мин./15 мин./5мин.

Механизированным способом (с использованием У30) - 1,0% -5 мин.

Туберкулезный:

Ручным способом - 1,0% /1,5%/2,0%/2,5%-90 мин./60 мин./30 мин./15мин.

Механизированным способом (с использованием У30) - 2,5%-5 мин.

Режим предстерилизационной очистки

МИ - 0,2% -5 мин.

Эндоскопы - 0,2%- 10 мин.



DEZOPHARM

**ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
САЛФЕТКИ**



ЭКОБРИЗ

Упаковка:

20 банок по 60 шт. салфеток
25 флоу-пак по 60 шт. салфеток

ДВ: н-пропанол, комплекс ЧАС, ПГМБ, ПАВ

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза)
- вирусы (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Экспресс экспозиция 30 сек. – 5 мин.
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Активно разрушает на поверхностях биологические пленки, обладает моющими и дезодорирующими свойствами
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

Средство предназначено для:

- **дезинфекция датчиков УЗИ;** стетоскопов, фонендоскопов; термометров;
- **дезинфекция стоматологического оборудования,** инструментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т. ч. с амальгамой;
- **дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования** (в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования), наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов;
- **дезинфекция куветов** для новорожденных и детских кроваток;
- **дезинфекция поверхностей** в помещениях, в т. ч. предметы обстановки (стулья, кровати, столы, матрасы, подголовники, подлокотники кресел, осветительная аппаратура, жалюзи, радиаторы отопления и т. п.);
- **дезинфекция предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;
- **гигиеническая обработка рук;**
- обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.

Режим дезинфекции:

от 30 сек. до 5 мин.



МИРОДЕЗ

Упаковка

10 банок по 60 шт. салфеток
10 флоу-пак по 100 шт. салфеток

ДВ: комплекс ЧАС, ПАВы

Антимикробная активность:

- бактерии (вкл. микобактерии туберкулеза)
- вирусы (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- патогенные грибы

Преимущества:

- Экспресс экспозиция 30 сек. – 5 мин.
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Разрушает на поверхностях биологические пленки
- Наличие моющих свойств
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

Назначение:

- **дезинфекция датчиков УЗИ;** стетоскопов, фонендоскопов;
- **предварительная очистка эндоскопов** и инструментов к ним;
- **дезинфекция стоматологического оборудования,** инструментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т. ч. с амальгамой;
- **дезинфекция поверхностей** медицинских приборов и оборудования, в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа; наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования;
- **дезинфекция куветов** для новорожденных и детских кроваток; поверхностей в помещениях, в т. ч. предметы обстановки (стулья, кровати, столы, чехлы матрасов, подголовники, подлокотники кресел, осветительная аппаратура, жалюзи, радиаторы отопления и т. п.);
- **дезинфекция предметов ухода за больными;** тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви, спортивной обуви;
- **дезинфекция телефонных аппаратов,** мониторов, компьютерной и офисной техники (включая ЖК-экраны); соляриев и ламп для соляриев;
- **обработка обуви** с целью профилактики грибковых заболеваний

Режим дезинфекции

от 30 сек. до 5 мин



ДЭЗИКС

Кол-во:

40 шт., 50 шт., 60, 100

Диспенсерная система с салфетками. Высококачественные салфетки в рулонах, разделенные перфорированной линией. Предназначена для использования как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном состоянии после пропитки дезинфицирующим либо моющим средством.

В комплекте:

диспенсер (ведро или банка) со специальным закрывающимся клапаном для извлечения салфеток, отдельный блок с салфетками в защитной пленке (размеры зависят от диспенсера), наклейка-формуляр.

Срок годности: не ограничен.

Сухие безворсовые салфетки «Дэзикс» изготовлены из мягкого экологичного нетканного материала высшего качества — смеси вязкозных и полиэфирных волокон без применения химических клеевых составов и наполнителей. Материал обладает большой впитывающей способностью, экологически чистый, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей и слизистой, не теряет своих свойств после стерилизации и обладают высокими барьерными свойствами по отношению к микроорганизмам. Материал химически инертный, стойкий к воздействию различных химических средств, спиртов, кислот, щелочей, антистатичен, не «царапает» поверхность и не «ворсится».

Уникальные свойства:

- бережно и мягко обрабатывают поверхности и предметы, эффективно удаляя загрязнения и смачивая поверхность дезинфектантом;
- изготовлены из мягкого безворсового материала высокой плотности;
- не оставляют ворса;
- безопасны для людей и окружающей среды;
- гипоаллергенны;
- обладают большой впитывающей способностью: каждые 100 квадратных сантиметров материала салфетки эффективно удерживают 3 мл жидкости;
- соответствуют высоким гигиеническим стандартам;
- снижают расход дезсредств;
- удобно использовать и держать «под рукой».

Способ применения:

- вскрыть банку,
- залить дезинфицирующий раствор согласно инструкции и дать пропитаться 30 минут,
- вытянуть из центра рулона край первой салфетки и про- деть в крышку,
- закрыть банку и наклеить заполненный футляр.

Средство предназначено для:

- использования в целях личной гигиены и санитарной безопасности в быту, в медицине, на производственных и других объектах.
- использования с пропиткой дезинфицирующими средствами с применением пластиковой диспенсерной системы:

- гигиенической обработки рук медицинского персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, станций скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических и прочих);
- гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений, работников сферы услуг (салонов красоты, парикмахерских, маникюрно-педикюрных кабинетов, фитнес-центров, бассейнов, гостиниц, бань, саун и других оздоровительно-досуговых комплексов), предприятий общественного питания и пищевой промышленности, объектов коммунальных служб, учреждений соцобеспечения, учреждений образования, культуры, отдыха и спорта;
- обеззараживания обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- дезинфекции резиновых ковров;
- дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях (кроме портящихся от воздействия спиртов), предметов обстановки, наружных поверхностей оборудования, приборов и аппаратов, не касающихся непосредственно с пациентом (диагностическое, физиотерапевтическое, лечебное оборудование и материалы к ним, стоматологическое оборудование, стоматологические кресла и установки, лампы и др.), жесткой мебели, подголовников, подлокотников, рукояток, поручней и т. п.



МИРОСЕПТИК ЭКСПРЕСС

Упаковка:

8 банок по 80 салфеток
Индивидуальная упаковка (саше):
60x100 мм по 1000шт. в коробке (5 зип-пакетов по 200 шт.)
135мм*180мм по 250 шт. в коробке

ДВ: изопропиловый, пропиловый спирты, хлоргексидин биглюконат

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулёза (тестировано на *M.terrae*)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, грипп, в т.ч. АН5N, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы

Уникальные свойства:

- Экспресс обработка операционного поля, локтевых сгибов доноров за **1 мин.**
- Экспресс обработка поверхностей **от 30 сек. до 5 мин.**

Средство предназначено для:

- обработка локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов*;
 - обработка кожи операционного и инъекционного полей, в том числе места прививки*;
 - гигиеническая обработка рук;
 - профилактическая обработка ступней ног;
 - обработка перчаток, надетых на руки персонала;
 - обработка поверхностей.
- *для салфеток в индивидуальной упаковке (саше)



ДЕЗУПАК

Упаковка

3 диспенсера-контейнера (3,9 л.) в комплекте с салфетками, информационными этикетками
 -100 шт. плотность - 45 г/м², количество рулонов в коробе - 15 шт,
 -150 шт. плотность - 45г/м², количество рулонов в коробе - 12шт,
 -100 шт. плотность - 60г/м², количество рулонов в коробе - 36 шт.
 информационная этикетка (по заказу)

Уникальные свойства:

- Уникальная безворсовая салфетка из нетканного материала без содержания натуральных волокон, прекрасно сохраняющая форму, устойчивая к разрыву, плотность 45г/м²
- Полное удаление видимых загрязнений
- Площадь обеззараживания поверхности – не менее 1,8м²
- Экономичный расход рабочего раствора -1,8л на 100 салфеток; 2,7л. на 150 салфеток
- Быстрое впитывание рабочего раствора – время до начала работы не более 10 минут
- Материал диспенсера-контейнера «ДЕЗУПАК» и салфеток к нему полностью совместимы с рабочими растворами дезинфицирующих средств производства ООО «Полисепт» и ООО «Мир дезинфекции»
- Научный отчет ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
- Инструкция по применению, согласованная с ИЛЦ ФБУН • ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Средство предназначено для:

- профессиональная уборка (мытьё, очистка) и дезинфекция
- способом протирания поверхностей в помещении, включая
- предметы обстановки, медицинские приборы, аппаратуру,
- оборудование и пр. объекты, рабочими растворами дезинфицирующих средств; в лечебно-профилактических организациях различного профиля, клинических, микробиологических лабораториях, машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, станциях переливания крови, в инфекционных очагах, зонах чрезвычайных ситуаций; в детских образовательных, социальных и пенитенциарных учреждениях, на предприятиях общественного
- питания и торговли, рынках; коммунально-бытовых объектах
- (офисы, парикмахерские, солярии, гостиницы, общежития, сауны, салоны красоты, учреждения спортивно-оздоровительного назначения, включая фитнес центры, бассейны, аквапарки и другие); на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, всех видах транспорта и других объектах.



РЕМЕДИН

Упаковка:

12 флоу-пак по 120 шт салфеток, плотность 35г/м², размер 180x130 мм

ДВ: изопропанол, комплекс ЧАС, производные гуанидина, молочная кислота, ПАВ

Антимикробная активность:

- бактерии включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза, тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*
- вирусы включая возбудителей энтеровирусных инфекций – полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций
- патогенные грибы

Преимущества:

- Экспресс экспозиция 30 сек. – 5 мин.
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Активно разрушает на поверхностях биологические пленки, обладает моющими и дезодорирующими свойствами
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

Назначение:

- **дезинфекция датчиков УЗИ;** стетоскопов, фонендоскопов, термометров;
- **дезинфекция стоматологического оборудования,** инструментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т. ч. с амальгамой;
- **дезинфекция поверхностей** медицинских приборов и оборудования (в т. ч. поверхностей аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования), наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов;
- **дезинфекция куветов** для новорожденных и детских кроваток;
- **дезинфекция поверхностей в помещениях,** в т. ч. предметы обстановки (стулья, кровати, столы, матрасы, подголовники, подлокотники кресел, осветительная аппаратура, жалюзи, радиаторы отопления и т. п.);
- **дезинфекция предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковров, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;
- **гигиеническая обработка рук;**
- **обработка ступней ног** с целью профилактики грибковых заболеваний.

Режим дезинфекции:

от 30 сек. до 5 мин



DEZOPHARM

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА



ХЛОРМИСЕПТ-Р

Упаковка:

10 банок по 810г, крышка, мембранная вставка (таблетки)
10 банок по 1,0кг, крышка, мембранная вставка (гранулы;
мерная ложка

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 99,7%;
таблетки массой 2,7 г. с содержанием активного хлора 58%

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *M.terrae*), особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы
- споры бактерий

Назначение:

- **дезинфекция поверхностей в помещениях**, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. столовой, лабораторной, аптечной), изделий медицинского назначения, белья, рабочей одежды, плевательниц, уборочного инвентаря, игрушек; мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- **дезинфекция** медицинских отходов класса Б и В;
- **дезинфекция** крови, сыворотки и других биологических жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплодных вод и пр.), промывных вод;
- использование в дезинфицирующих ковриках;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток на 10 литров воды):

Бактериальный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.

Вирусный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.

Туберкулезный - 4 таб. - 90 мин./20 таб.- 60 мин.



ХЛОРМИСЕПТ ЛЮКС

Упаковка

10 банок по 400 таб./1,35г., крышка, мембранная вставка
10 банок по 600 таб./1,35г., крышка, мембранная вставка
10 банок по 300 таб./2,7г., крышка, мембранная вставка

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 98%; ПАВ;
таблетки массой 1,35 г. и 2,7 г. с содержанием активного хлора 54,8%

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *M.terrae*), легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы, в т.ч. плесневые
- споры бактерий
- ампликоны ДНК/РНК

Назначение:

- **дезинфекция и мытье** поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. столовой, лабораторной, аптечной), изделий медицинского назначения, белья, рабочей одежды, плевательниц, уборочного инвентаря, игрушек; мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- **дезинфекция** медицинских отходов класса Б и В;
- **дезинфекция** крови, сыворотки и других биологических жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплодных вод и пр.), промывных вод;
- **дезинфекция** воздушных фильтров, радиаторных решеток, насадок, накопителей конденсата систем вентиляции и кондиционирования из коррозионно-стойких материалов; использование в дезинфицирующих ковриках;
- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток на 10 литров воды):

Бактериальный – 1 таб. (1,35 г.) - 30 мин.; 1 таб. (2,7 г.) - 15 мин.

Вирусный – 1 таб. (1,35 г.) - 60 мин.; 1 таб. (2,7 г.) - 15 мин

Туберкулезный - 4 таб. (2,7 г.) – 60 мин.; 5 таб. (2,7 г.) – 30 мин.



ХЛОРМИСЕПТ ЭКОНОМ

Упаковка:

8 банок по 1095 г, крышка, мембранная вставка (таблетки)

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, вспомогательные компоненты; таблетки массой 3,65 г. с содержанием активного хлора 42%

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *M.terrae*), особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы
- споры бактерий

Назначение:

- дезинфекция поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. столовой, лабораторной, аптечной), изделий медицинского назначения, белья, рабочей одежды, плевательниц, уборочного инвентаря, игрушек; мусороуборочного оборудования и мусоросборников;
- дезинфекция медицинских отходов класса Б и В;
- дезинфекция крови, сыворотки и других биологических жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплодных вод и пр.), промывных вод;
- использование в дезинфицирующих ковриках;
- проведение генеральных уборок, в т. ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток на 10 литров воды):

Бактериальный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.

Вирусный – 1 таб. - 60 мин./2 таб.- 30 мин.

Туберкулезный - 4 таб. - 60 мин./7 таб.- 90 мин.



АБАКТЕРИЛ ХЛОР

Каждая хлорная таблетка весит 3,4 г и содержит 1,5 г активного хлора в форме натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, которая выделяется в воду при растворении таблеток.

Дезинфицирующее средство «Абактерил-хлор» в гранулах – мелкие сыпучие гранулы белого цвета с запахом хлора, массовая доля активного хлора 56,0±5,0%

Антимикробная активность в отношении:

в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*, возбудителей особо опасных инфекций, споры бацилл), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т. ч. типа А, включая А Н5N1, А Н1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов.

Состав:

Средство на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты 2-водной, выпускается в двух формах: таблетки и гранулы. Действующим веществом является активный хлор, выделяющийся при растворении средства в воде.

Срок хранения средства / рабочих растворов:

6 лет / 5 суток.

Назначение:

- дезинфекция: поверхностей в помещениях; медицинских инструментов, в том числе одноразовых; оборудования; биологических выделений; крови; медицинских и пищевых отходов; инструмента парикмахерских; обуви; резиновых коврик; систем мусороудаления
- обработка транспорта;
- борьба с плесенью;
- для придания моющих свойств к рабочим растворам можно добавлять синтетическое моющее средство.



АКВАБРИЗ

Упаковка:

АКВАБРИЗ 2; 2,5; 10 – контурно-безъячейковая упаковка (10 таб.)

АКВАБРИЗ 300 -банка

АКВАБРИЗ 750 - банка

АКВАБРИЗ 1000- банка

АКВАБРИЗ 1670 -банка

ДВ: 1 таблетка содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХЦК) 3,6 мг; 4,5 мг; 18,0 мг; 0,5 г; 1,3 г; 1,8 г; 3,0 г и соответственно по количеству выделяемого активного хлора 2,0 мг; 2,5 мг; 10,0 мг; 300 мг; 750 мг; 1000 мг; 1670 мг

Антимикробная активность:

- бактерии
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы

Преимущества:

- Эффективность при любом качестве воды
- Широкий ассортимент таблеток
- Быстрая растворимость
- Простота и удобство применения
- Длительность срока хранения (5 лет)
- Универсальность назначения

Преимущества:

- **обеззараживание воды** при групповом и индивидуальном водопотреблении из нецентрализованных источников (рек, озер, прудов и т. д.) в полевых и экстремальных условиях, в чрезвычайных ситуациях;
- **обеззараживание воды для мытья овощей**, фруктов, зелени, потенциально загрязненных патогенной микрофлорой;
- **дезинфекция емкостей** для перевозки и хранения питьевой воды;
- **дезинфекция поверхностей** в помещениях, жесткой мебели, белья, посуды, предметов ухода, изделий медицинского назначения, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, медицинских отходов.



РЕМЕДИН ХЛОР

Упаковка:

10 банок по 810 г., крышка, мембранная вставка (таблетки)

ДВ: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 98%; ПАВ; таблетки с крестообразной фаской – риской массой 2,7 г. с содержанием активного хлора 54,8%

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *M.terrae*), легионеллеза, анаэробных инфекций, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рта – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы, в т.ч. плесневые
- споры бактерий

Назначение:

- дезинфекция и мытье: поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. столовой, лабораторной, аптечной), изделий медицинского назначения, белья, рабочей одежды, плевательниц, уборочного инвентаря, игрушек; мусороборочного оборудования и мусоросборников;
- дезинфекция медицинских отходов класса Б и В;
- дезинфекция крови, сыворотки и других биологических жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора, околоплодных вод и пр.), промывных вод;
- дезинфекция пищевых яиц;
- дезинфекция, мойка и дезодорирование холодильных и морозильных установок;
- дезинфекция воздушных фильтров, радиаторных решеток, насадок, накопителей конденсата систем вентиляции и кондиционирования из коррозионно-стойких материалов; использование в дезинфицирующих ковриках;
- проведение генеральных уборок, в т.ч. с использованием уборочных технологий.

Режим дезинфекции поверхностей (количество таблеток на 10 литров воды):

Бактериальный – 1/2 таб. - 30 мин./1 таб.- 15 мин.

Вирусный – 1/2 таб. - 60 мин./1 таб.- 30 мин.

Туберкулезный - 4 таб. - 60 мин./7 таб.- 30 мин.



DEZOPHARM

ГИГИЕНА РУК



ЧИСТОТА АНТИСЕПТИК

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого крепежа

Состав: ундециленамидопропилтримониум метосульфат (тетранил У), функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты

Преимущества:

- Обладает хорошими моющими свойствами
- Защищает и увлажняет кожу
- Антимикробная активность
- Не содержит красителей и ароматизаторов
- pH 5,0-7,0
- Не раздражает кожу

Назначение:

- гигиеническая обработка рук;
- санитарная обработка кожных покровов.



ЧИСТОТА МЫЛО

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого крепежа

Состав: натрия лауретсульфат, эфиры жирных кислот кокосового масла, натрия хлорид, кислота лимонная и другие функциональные добавки, вода

Преимущества:

- Обладает хорошими моющими свойствами
- Защищает и увлажняет кожу
- Антибактериальный эффект
- Не содержит красителей и ароматизаторов
- Имеет нейтральное значение pH
- Не раздражает кожу

Назначение:

- гигиеническая обработка рук;
- санитарная обработка кожных покровов.



ЧИСТОТА BABY

Упаковка:

24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия

Состав: лауретсульфат натрия, дехитон, децил глюкозид, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, провита-мин В-5, натрия хлорид, бетаин натуральный, ундециленоил глицин, кислота лимонная, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон

Преимущества:

- Применение с самых первых дней жизни ребенка
- Мягко очищает, смягчает и ухаживает за кожей
- Гипоаллергенно
- Не содержит красителей и ароматизаторов
- Имеет нейтральное значение pH
- Ежедневный уход за особо чувствительной и предрасположенной к воспалительным процессам кожей

Назначение:

- для применения в детских лечебно-профилактических организациях, в т.ч. перинатальных центрах, родильных домах для:
- общей и частичной санитарной обработки кожных покровов детей, для принятия душа и в качестве пены для ванн;
- омывания кожи материнской груди до и после кормления;
- гигиенической обработки рук детей в детских лечебно-профилактических учреждениях;
- гигиенической обработки рук детей в детских дошкольных и школьных учреждениях;
- гигиенической обработки рук медицинского персонала с особо чувствительной и предрасположенной к воспалительным процессам кожи в лечебно-профилактических учреждениях;
- для гигиенического мытья рук и тела населением, в том числе детьми, в быту.



ДЗЕТАДЕРМ

Фасовка: флаконы по 0,5 с дозатором, тубы по 100 мл

Состав: вода фильтрованная, масло вазелиновое, глицерин, изогексадекан, полиглицерил-10 полирицинолеат, ППГ-15 стеариловый эфир, дизозолидинилмочевина, метилпарабен, пропилпарабен, пропиленгликоль, магния сульфат, натрия полиакрилат, иодопропилбутилкарбамат, отдушка.

Преимущества:

- Защищает кожу от неблагоприятных воздействий
- Создает тонкую защитную пленку.



РЕМИСЕПТ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого крепежа

ДВ: триклозан, 2-феноксизтанол, ухаживающие и увлажняющие добавки

Антимикробная активность:

- бактерии грамположительные и грамотрицательные, кроме возбудителей туберкулеза
- патогенные грибы рода Кандида

Преимущества:

- Обладает хорошими моющими свойствами
- Защищает и увлажняет кожу
- Антибактериальный эффект
- Не содержит красителей и ароматизаторов
- Не раздражает кожу

Назначение:

- гигиеническая обработка рук;
- санитарная обработка кожных покровов.



ГАММАСЕПТ

Упаковка

3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
10 фл. по 1,0 л.,
10 фл. по 1,0 л., колпачок с контролем вскрытия

Состав: цетилстеариловый спирт, кокамидопропилбетаин, стеарет-2, стеарет-21, диазолидинилмочевина, масло вазелиновое, метилпарабен, пропилпарабен, пропиленгликоль, ППГ-15 стеариловый эфир, отдушка и другие функциональные добавки, вода очищенная

Преимущества:

- Не раздражает кожу рук при частом использовании
- Защищает кожу и сохраняет ее эластичность
- Живляет микротрещины
- Останавливает рост и размножение бактериальной флоры и грибов
- Не содержит красителей
- Устраняет больничные запахи

Назначение:

- санитарная обработка кожных покровов;
- профилактика пролежней;
- гигиеническая обработка рук.



СПРИНТЕР

Состав: в качестве биоцидной добавки содержит триклозан, в качестве моющей основы — комплекс мягких ПАВ. В качестве ухаживающей за кожей добавки содержит экстракт ромашки, который оказывает успокаивающее, противовоспалительное, ранозаживляющее действие на кожу, предотвращая сухость и шелушение и глицерин, который уменьшает испарение влаги с поверхности кожи, способствует поддержанию защитной функции кожи, pH мыла 5,5-6,5.

Антимикробная активность в отношении:

в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий и грибов рода Кандида (кроме микобактерий туберкулеза).

Предназначено для:

- гигиенической обработки рук хирургов, медперсонала;
- общей санитарной обработки кожи тела медперсонала и пациентов в ЛПУ и санпропускниках;
- гигиенической обработки рук сотрудников лабораторий; аптечных заведений;
- гигиенической обработки рук работников и посетителей коммунальных объектов, гостиниц, вокзалов общественных туалетов, парикмахерских, массажных салонов, общежитий, бань, бассейнов, спортзалов;
- гигиенической обработки рук работников предприятий пищевой промышленности и общественного питания;
- гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических предприятий;
- для гигиенического мытья рук и тела населением в быту.



КАППАДЕРМ

Объемы: 0.5 л; 1 л; 5 л.

Фасовка: флаконы по 0,5 с дозатором, тубы по 100мл.

Состав: вода фильтрованная, масло вазелиновое, цетилстеариловый спирт, стеарит-2, стеарит-21, ППГ-15 стеариловый эфир, изогексадекан, дизозолидинилмочевина, метилпарабен, пропилпарабен, пропиленгликоль, экстракт череды, экстракт ромашки, экстракт василька, диметикон, аллантоин, витамин F, токоферол ацетат, карбомер, отдушка.

Преимущества:

- Обладает противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом
- Способствует быстрой регенерации кожи, улучшает обменные процессы
- Стимулирует кожное дыхание, укрепляет мембраны клеток
- Устраняет шелушение, придает коже упругость и бархатистость



АБАКТЕРИЛ СОФТ

Объёмы:

0.2 л; 0.5 л; 1 л; 5 л.

Состав: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкил-диметилбензиламмоний хлорид, ухаживающие за кожей компоненты, в том числе растительные экстракты и масла, и другие функциональные добавки.

Антимикробная активность:

обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, а также грибов рода *Candida*.

Преимущества:

- оптимальная композиция активных веществ обеспечивает длительное антибактериальное действие,
- создано на основе мягких ПАВ с хорошей дерматологической характеристикой,
- содержит комплекс растительных экстрактов, масло зародышей пшеницы,
- бережно относится к кожным покровам, смягчает и увлажняет кожу, повышает её эластичность, предотвращая сухость и шелушение,
- оказывает противовоспалительное, и успокаивающее действие,
- отлично подходит для мытья и санитарной обработки кожных покровов,
- применяется для антимикробной обработки поверхностей.



ЧИСТОТА ЛАЙТ

Упаковка:

3 кан. по 5,0 л., крышка
24 фл. по 0,5 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л., диспенсер
12 фл. по 1,0 л., флип-топ
14 фл. по 1,0 л., диспенсопак для настенного локтевого крепежа

Состав: натрия лауретсульфат, кокамидопропилбетаин, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, натрия хлорид, кислота лимонная, глицерин, провитамин В-5, бетаин натуральный, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, вода

Преимущества:

- соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 (п.3502) для 1 этапа обработки рук хирургов «мытье кистей рук и предплечий теплой проточной водой с жидким мылом без антимикробных компонентов»;
- обладает хорошим моющим и мягким очищающим действием;
- не сушит и не раздражает кожу, сохраняет ее эластичность, не нарушает её липидный баланс;
- не содержит красителей и ароматизаторов;
- не обладает сенсibilизирующим действием (гипоаллергенно)
- рекомендуемое значение pH 5,0-6,5
- подходит для частой ежедневной обработки сухой и чувствительной кожи

Назначение:

- мытье рук хирургов
- гигиеническая обработка рук
- гигиеническая обработка кожных покровов
- мытье волос

DEZOPHARM

**ОЧИЩАЮЩИЕ И
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА**



ДЕЗОЛВЕР КЛИН

Упаковка:

2 ведра по 3,8 кг
1 мешок по 10 кг

ДВ: перкарбонат натрия, активатор перекиси

Антимикробная активность:

- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae)
- вирусы, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы

Преимущества:

- Совмещение дезинфекции, стирки и отбеливания
- Высокая концентрация активных компонентов
- Высокая эффективность при низком расходе: 50-70 г средства на 5 кг сухого белья
- Эффективное удаление пятен крови и других биологических загрязнений
- Бережное воздействие на волокна ткани
- Сохранение и восстановление цвета тканей
- Регулируемое пенообразование
- Совместимость для всех типов стиральных машин, в том числе с дозирующими устройствами
- Отсутствует повреждающее действие на внутренние части стиральных машин
- Предотвращение образования технического осадка и накипи и при их наличии удаление
- Хорошая вымываемость из тканей во время полоскания
- Полностью биоразлагаемо

Назначение:

для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных изделий, включая постельное белье, подкладные пеленки родильного дома, пеленки новорожденных, нательное белье, спецодежду обслуживающего персонала, столовое и кухонное белье, текстильные средства уборки, в том числе МОПы, и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон, в т.ч. загрязненных кровью, выделениями, другими биологическими субстратами и пищей, ручным способом и в процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных машинах любого типа, в том числе с дозирующими устройствами, в ЛПО различного профиля, включая службы родовспоможения, в т.ч. неонатальные центры

Режимы дезинфекции/стирки в автоматических стиральных машинах

Бактериальный, вирусный - Программа стирки при температуре не менее 40°C
Туберкулезный, грибковый - Программа стирки при температуре не менее 60°C

** при загрязнении текстильных изделий кровью и другими биологическими субстратами необходимо выбирать программу стирки, включающую предварительную стирку при температуре не более 30°C.*



РЕМЕДИН ДЛЯ СТИРКИ

Упаковка:

2 ведра по 3,8 кг.

ДВ: перкарбонат натрия, активатор перекиси

Антимикробная активность:

- бактерии включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae)
- вирусы включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- патогенные грибы, включая плесневые

Преимущества:

- Совмещение дезинфекции, стирки и отбеливания
- Высокая концентрация активных компонентов
- Высокая эффективность при низком расходе: 50-70 г средства на 5 кг сухого белья в зависимости от жесткости воды
- Эффективное удаление пятен крови и других биологических загрязнений
- Сохранение и восстановление цвета тканей
- Регулируемое пенообразование
- Совместимость для всех типов стиральных машин, в том числе с дозирующими устройствами
- Отсутствует повреждающее действие на внутренние части стиральных машин
- Предотвращение образования технического осадка и накипи и при их наличии удаление
- Хорошая вымываемость из тканей во время полоскания
- Полностью биоразлагаемо

Назначение:

• для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных изделий, включая постельное белье, подкладные пеленки родильного дома, пеленки новорожденных, нательное белье, спецодежду обслуживающего персонала, столовое и кухонное белье, текстильные средства уборки, в том числе МОПы, и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон, в т.ч. загрязненных кровью, выделениями, другими биологическими субстратами и пищей, ручным способом и в процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных машинах любого типа, в том числе с дозирующими устройствами, в ЛПО различного профиля, включая службы родовспоможения, в т.ч. неонатальные центры

Режимы дезинфекции/стирки в автоматических стиральных машинах

Бактериальный, вирусный - Программа стирки при температуре не менее 40°C
Туберкулезный, грибковый - Программа стирки при температуре не менее 60°C

** при загрязнении текстильных изделий кровью и другими биологическими субстратами необходимо выбирать программу стирки, включающую предварительную стирку при температуре не более 30°C.*



ФИОН НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Упаковка:

фл.1 л, кан.5 л.

pH 1% раствора 8,0

Назначение:

- ежедневный уход за любыми поверхностями;
- ручная и механизированная мойка синтетических и виниловых покрытий, асфальта, дерева, паркета, ламината, линолеума, стекла, облицовочной плитки, бетона, гранита и мрамора, металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей;
- мытье производственного оборудования, посуды, тары, сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера.

Область применения:

- учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
- предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
- медицинские организации различного профиля;
- для бытового применения.

Состав: <5% комплексообразователь, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, регулятор pH

Дозировка

2-10 мл на 1л воды для ежедневной уборки;

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, смывать рабочие растворы с поверхностей, контактирующих с пищей.



ФИОН ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Форма выпуска:

- фл.1 л, кан.5 л

pH 1% раствора 9,0

Назначение:

- эффективное удаление производственных, бытовых и атмосферных загрязнений, пыли, грязи, копоти, т. ч. с фасадов зданий и сооружений, стойких масляно-жировых загрязнений;
- ручная и механизированная мойка водостойких и щелочестойких поверхностей, для синтетических и виниловых покрытий, ПВХ, поверхностей из металлов (в т.ч. алюминия), линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, мрамора, гранита, натурального и искусственного камня, наливных полов, окрашенных панелей.

Область применения:

- медицинские организации различного профиля;
- учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
- предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
- для бытового применения

Состав: <5% неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид калия

Дозировка 2-10 мл на 1л воды для ежедневной уборки; 15-50 мл на 1 л воды для генеральной уборки

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.



ФИОН ЗАПАХУ НЕТ

Форма выпуска

фл. 0,75 л с распылителем, кан. 5 л.

pH 1% раствора 7,0

Назначение:

- эффективная нейтрализации запаха на длительное время путем поглощения различных запахов: аммиака и сероводорода, пищевых остатков, домашних животных, табака, пота, отходов, мусора и другие неприятные запахи на различных поверхностях

Область применения:

- медицинские организации различного профиля;
- учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
- предприятия пищевые торговли, общественного питания, бизнес-центры, спорткомплексы, бассейны, коммунальные, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
- для бытового применения.

Состав: <5% неионогенные ПАВ, соль цинка, консервант, ароматизирующий компонент

Дозировка

использовать без разбавления, распылить с помощью триггера на источающую запах поверхность с расстояния 15-20 см

Меры предосторожности: избегать попадания средства в глаза и другие слизистые!



ФИОН СТЕКЛО КОНЦЕНТРАТ

Форма выпуска

фл. 1 л, кан. 5 л.

pH 1% раствора 9,5

Назначение:

- для ежедневного и периодического мытья окон, витражей, витрин, перегородок и стеклянных дверей, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков с эффективным удалением атмосферных, почвенных и органических загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей.

Область применения:

- для ежедневного и периодического мытья окон, витражей, витрин, перегородок и стеклянных дверей, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков с эффективным удалением атмосферных, почвенных и органических загрязнений со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей.
- учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
- предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
- для бытового применения

Состав: <5% комплексообразователь, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ

Дозировка

2,5-5 мл на 1л воды

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз!



ФИОН СИЯЮЩИЙ ПОЛ КОНЦЕНТРАТ

Форма выпуска

фл.1 л, кан.5 л.

pH 1% раствора 7,0

Назначение:

- эффективная очистка и уход за полом и другими моющимися поверхностями с полирующим эффектом и обновлением внешнего вида;
- ручная и механизированная мойка синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из ламината, паркета, дерева, линолеума, облицовочной плитки.

Область применения:

- учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
- медицинские организации различного профиля;
- предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
- для бытового применения

Состав: <5% комплексообразователь, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, воск

Дозировка

2-10 мл на 1л воды

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки и защитные очки!



МАЖЕСТИК НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Форма выпуска

фл.1 л, кан.5 л.

pH 1% раствора 8,0

Назначение:

- ручная и механизированная мойка виниловых покрытий и синтетических, ламината, дерева, паркета, линолеума, асфальта, бетона, облицовочной плитки, мрамора, гранита и стекла, металлов (в т.ч. цветных), всех видов тканей;
- мытье производственного оборудования, посуды, тары, сантехники, кухонного оборудования, предметов интерьера.
- ежедневный уход за любыми поверхностями;

Область применения:

- медицинские организации различного профиля;
- учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
- предприятия пищевые, торговли, общественного питания, бассейны, спорткомплексы, коммунальные, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
- для бытового применения.

Состав: <5% комплексообразователь, неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, регулятор pH

Дозировка

2-10 мл на 1л воды для ежедневной уборки;

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, смывать рабочие растворы с поверхностей, контактирующих с пищей.



МАЖЕСТИК ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Форма выпуска

фл.1 л, кан.5 л.

pH 1% раствора ≥ 9

Назначение:

- эффективное удаление производственных, бытовых и атмосферных загрязнений, пыли, грязи, копоти, т. ч. с фасадов зданий и сооружений, стойких масляно-жировых загрязнений;
- ручная и механизированная мойка водостойких и щелочестойких поверхностей, для синтетических и виниловых покрытий, ПВХ, поверхностей из металлов (в т.ч. алюминия), асфальта, дерева, паркета, ламината, линолеума, бетона, облицовочной плитки, мрамора, гранита, стекла, натурального и искусственного камня, наливных полов, окрашенных панелей.

Область применения:

- медицинские организации различного профиля;
- учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения;
- предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы;
- для бытового применения.

Состав: <5% амфотерный ПАВ, органический растворитель, неионогенные ПАВ, комплексообразователь, гидроксид калия

Дозировка

2-10 мл на 1 л воды для ежедневной уборки;
15-50 мл на 1 л воды для генеральной уборки

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, средства для защиты глаз.



ФИОН САНИТ КОНЦЕНТРАТ

Форма выпуска

фл.1 л, кан.5 л.

pH 1% раствора $\leq 4,5$

Назначение:

- чистка полов, ванн, кранов, стен, унитазов, раковин, душевых кабин и пр. оборудования с удалением известкового налета, солевых отложений, ржавчины, мочевого камня, жира, следов косметики и других загрязнений, не повреждает хромированные, пластиковые, акриловые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль, образует на обрабатываемых поверхностях грязеотталкивающую пленку.

Область применения:

- медицинские организации различного профиля; учреждения социального обеспечения, образовательные, детские школьные и дошкольные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, пенитенциарные учреждения; предприятия пищевые, торговли, общественного питания, коммунальные, спорткомплексы, бассейны, бизнес-центры, супермаркеты, транспорт, станции метрополитена, вокзалы, общественные туалеты, для бытового применения.

Состав: $\geq 5\%$, но <15% сульфаминовая кислота, ортофосфорная кислота, <5% неионогенные ПАВ

Дозировка:

50-100 мл на 10 л воды для ежедневной очистки;
1-2 л. на 10 л воды для генеральной уборки;
1-3 л. на 10 л воды для очистки унитазов с сильным минеральным налётом

Меры предосторожности: использовать резиновые перчатки, при распылении использовать дополнительно средства для защиты глаз и лица, плотно прилегающую к телу защитную одежду, универсальный респиратор типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В.



ФИОН ДЕЗ САНИТ

Форма выпуска

Форма выпуска

фл.1 л, кан.5 л

Наличие индикаторных полосок №50, №100

pH 1% водного раствора средства – 2,5

Назначение: для мытья, очистки и дезинфекции

- санитарно-технического оборудования (включая ванны, ванночек для рук, унитаза, биде, писсуары и пр.);
- ванн для ног, душевые кабины, клеенчатых чехлов, лотков, емкостей;
- резиновых и пластиковых ковров, обуви из пластмасс и резин в медицинских, ветеринарных организациях, в бассейнах, банях саунах и других спортивных и оздоровительных организациях;
- уборочного материала, мопов, уборочного оборудования и инвентаря (ветошь, тазы, ведра, швабры и др.);
- мусороуборочного оборудования, мусоропроводов, мусорных баков и мусоросборников, мусоровозов;

Состав: комплекс ЧАС, органических кислот (лимонной и гликолевой), фосфорная кислота, неионогенные ПАВ, синергисты биоцидов, ингибитор коррозии,

Режимы дезинфекции поверхностей:

Бактериальный — 0,25%/0,5%/1% — 15 мин./10 мин./5 мин.

Вирусный — 0,5%/1,5%/2% — 30 мин./15 мин./5 мин.

Грибковый (дерматофиты) — 2,0%/4,0%/5,0% — 60 мин./30 мин./15 мин.

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки и средства для защиты глаз.



ФИОН ДЕЗ УБОРКА

Форма выпуска

фл.1 л, кан.5 л.

Наличие индикаторных полосок №50, №100

pH 1% раствора 7,0

Антимикробная активность:

- бактерии включая возбудителей внутрибольничных инфекций;
- вирусы включая возбудителей полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и других возбудителей острых респираторных инфекций, цитомегаловирусы, энтеровирусы, норовирусы, ротавирусы, вирусы герпеса, Коксаки, ЕСНО.
- патогенные грибы

Назначение:

- дезинфекция и мытьё, поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, в т.ч. акриловых ванн лечебных, грязевых, минеральных, гидромассажных и пр.;
- мытьё (обезжиривание) и дезинфекция столовой посуды, чайной и стеклянной посуды и столовых приборов, в том числе совмещенных в одном процессе;
- дезинфекция, мойка и дезодорирование холодильных и морозильных установок в организациях любого профиля, в том числе медицинских;
- дезинфекция и мытьё помещений и оборудования (в том числе оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, потребительских рынках;
- дезинфекция помещений, оборудования, спецодежды парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

Состав: комплекс ЧАС, неионогенные ПАВ, синергисты биоцидов, ингибитор коррозии

Режимы дезинфекции

Поверхности:

Бактериальный — 0,25%/0,5%/1,5% — 60 мин./15 мин./5 мин.

Вирусный — 0,5%/1,0%/2% — 30 мин./15 мин./5 мин.

Грибковый (дерматофиты) — 2,0%/4,0%/6,0%/8,0% — 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.

Меры предосторожности: Беречь от детей! Использовать средства для защиты глаз и резиновые перчатки.

[illegible]

DEZOPHARM

📍 г. Нур-Султан, проспект Женис 1,
ТД «Арман», офис №11

📍 г. Караганда, ул. Касым Аманжолова 17/3

📍 г. Алматы, проспект Сейфуллина 531,
БЦ «Сарыарка», офис №213/1

☎ +7 747 095 30 01, +7 701 348 76 62

✉ info@dezopharm.kz

📷 [@dezopharm.kz](https://www.instagram.com/dezopharm.kz)

🌐 www.dezopharm.kz